


MASCARILLA FACIAL FILTRANTE FFP2



DESCRIPCIÓN

- Dispositivo de protección individual Cat. III
- Ajustador de nariz moldeable
- Material: Tela no tejida/Melt-Blown
- Dos elásticos para las orejas
- Ganchos de extensión para la nuca
- Costuras temoselladas
- Libre de látex
- Resistente a las salpicaduras
- Eficiencia de filtración de bacterias >95%
- Color blanco y negro
- Ganchos incluidos en el paquete para el uso de la nuca

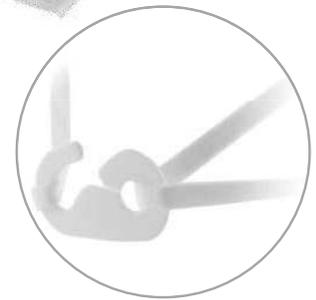

- La mascarilla facial filtrante desechable FFP2 sin válvula es un dispositivo de protección individual eficaz para proteger las vías respiratorias de humos, polvos y aerosoles. La máscara filtrante FFP2 tiene una forma de copa clásica que cubre la boca y la nariz y una pinza nasal moldeable tradicional; la forma clásica se adapta a cualquier forma de cara.
- Normativa Reg. 2016/425/UE
Mascarilla facial de uso médico - Requisito y método de prueba
Norma EN149:2001+A1:2009 / 14683:2019
Basada en Ensayo 2021EC0208 y UE de tipo 2021 EC0209B

- Blanco: Ref. 55702

- Negro: Ref. 55734



ENVASE DE PRODUCTO



UNIDADES

- 3 / 5 unidades por sobre
- 30 unidades por caja

PLAZO DE FABRICACIÓN

2 días hábiles desde la recepción de la transferencia

INSTRUCCIONES DE USO



Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.



Enganchar la mascarilla a las orejas o a la parte posterior de la cabeza, según el modelo.



Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla, verificando que cubra la barbilla.



Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz