



Manta térmica - instrucciones de uso

MANTA ISOTÉRMICA - PĂTURĂ IZOTERMĂ ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

ES - APLICACIONES Les propiedades de reflexion del material permiten proteger el cuerpo de las radiaciones de calor o evitan la dispersion del calor del cuerpo. Se aconseja su uso en caso de **ACCIDENTES, VIENTO, LLUVIA, LUGARES SOLEADOS. INSTRUCCIONES DE USO** Colocar la manta en cima del cuerpo sin apretar. Lado **dorado** hacia el exterior para el calor. Lado **plateado** hacia el exterior para reflejar los raios solares.

⚠ PRECAUCIONES • No se deben utilizar productos húmedos o mohosos. • Para un solo uso, no se permite la reutilización. • No almacene a temperaturas extremas. • Desechar de forma segura después de su uso para evitar el riesgo de infección. • Informar de cualquier incidencia grave en relación con el dispositivo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE** • El dispositivo debe almacenarse a una humedad relativa inferior al 80%, el entorno de almacenamiento debe mantenerse libre de gases corrosivos, seco, evitando la luz solar, en condiciones de buena ventilación y limpio. • Se debe tener cuidado con el dispositivo durante el transporte y la manipulación.