

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Fecha: 25-11-22

PRODUCT DATA SHEET

Version: 01

<b>Referencia/Reference</b>  <b>FL222</b>	<b>Nombre / Name:</b>  <b>Calcetín Profesional Posster TALLA UNICA</b>	<b>Marca:/Brand</b>  
<b>Fabricante:</b> Manufacturer	<b>CALZADOS FORTIA, S.L.</b>	
<b>Dirección:</b> Address	C. Cordoba, 26570 Quel, La Rioja- España <b>Mail:</b> Adelardo.arechavaleta@calzadosfortia.es	
<b>Descripción:</b> Description	<b>Foto del artículo:</b> Item photo	
<p>Calcetín de compresión decreciente, es decir, ejerce una mayor compresión a nivel de tobillo disminuyendo a medida que se acerca a la rodilla para favorecer el retorno sanguíneo y mejorar la circulación. Tejido tupido, opaco y confortable.</p> <p>La compresión en el punto b (tobillo) es de entre 15 y 21 mm.</p> <p><b>TECNOLOGÍA PIES SECOS</b></p> <p>Los calcetines están compuestos por un tejido inteligente fabricado con una doble capa higroscópica. La capa interior absorbe el sudor y, la segunda capa, drena el sudor hacia la superficie para evaporarlo. Esta tecnología consigue mantener la piel seca.</p>		
<b>Especificaciones: /Specifications</b>		
<b>Composición:/Composition</b> Poliamida: 85 % Elastano: 15 %  Estas materias primas cumplen con la normativa OEKO-TEX		
<b>Colores:/Colors</b> Negro	<b>Unidades de venta:/Sales units</b> Par	<b>Codificación lote:/Batch coding</b> aawwnntt – (aa) año, (ww) semana, (nn) código de materia prima
<b>Caducidad/Vida útil:</b> Expiration/useful life En condiciones apropiadas de almacenamiento, la caducidad para este producto es de 10 años.	<b>Estuchado:/Boxed</b> Percha, y tarjetas con información del producto	
<b>Colocación:</b> Placement	<b>Forma de uso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Girar el calcetín al revés hasta el talón.</li> </ul>	

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Fecha: 25-11-22

PRODUCT DATA SHEET

Version: 01

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Colocar el pie hasta el talón.</li><li>• Pasar el resto del calcetín hasta encima del tobillo, empezar a estirar con la yema de los dedos hasta colocarlo bien en la pierna.</li><li>• Importante el calcetín largo debe llegar justo debajo de la rodilla, no doblar la cinturilla, repartir bien el tejido a lo largo de la pierna, con las palmas de las manos deslizar el tejido hacia arriba y abajo, masajeando hasta que quede perfectamente distribuido, evitando pliegues que puedan causar un efecto torniquete.</li></ul>
<p><b>Precauciones de uso:</b> Precautions for use:</p>	<p>En caso de molestia o irritación, retirar inmediatamente la prenda. Para evitar otros efectos no deseados se recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elegir bien la talla, es muy importante fijarse bien en la tabla de medidas de cada producto, ya que comprar una talla inadecuada puede significar que la presión que tiene que ejercer la prenda no sea la esperada y pierda efectividad.</li><li>2. La prenda es reutilizable siempre y cuando se sigan los consejos para su cuidado. El tiempo, el uso y el lavado diario pueden reducir la presión, y la elasticidad necesaria, por ello se recomienda renovarlas cuando se aprecie dicho deterioro.</li><li>3. Tener cuidado con las uñas y las joyas, pueden provocar agujeros y carreras</li></ol>
<p><b>Normas de conservación y su almacenamiento:</b> Conservation and storage rules:</p>	<p>Para asegurar que no pierda sus propiedades y obtener mayor durabilidad de la prenda, hay que lavarla siempre a mano con jabones neutros y agua tibia. No utilizar suavizantes, lejías, o cualquier otro tipo de aditivos. No secar en fuentes de calor directos como el sol o radiadores. No usar secadoras. No planchar. Almacenar en un lugar seco, temperatura ambiente y evitar la radiación solar directa. Nunca en la intemperie.</p>

Firmado:

Responsable Técnico

  
**FORTIA**  
CALZADOS FORTIA SL  
Pol. Mereta - C/ Zorobaba s/n  
26.570 Quejeda (La Rioja)  
N.I.F. B26563668

Adelardo Arechavaleta

Licenciado en Ciencias Químicas