



Ficha técnica del producto

Mascarilla Higienica de 3 capas Clase I



Descripción general del producto

La mascarilla Higienica de 3 capas desechable , es una mascarilla que está Regulada Por la directiva de Productos Sanitarios, transpuesta en España al Real Decreto 414/1996.


Esta mascarilla tiene como finalidad evitar la trasmisión de agentes infecciosos por Parte de la persona que la lleva.

En una mascarilla sanitaria, el ajuste es importante pero, aunque no sea hermético, la eficacia no se ve comprometida.

Composición

Mascarilla con 3 capas de TST:

- 1 capa de TST Hidrófugo de 25g/m² (parte exterior)
- 1 capa de TST de Meltblown de 25g/m²
- 1 capa de TST de 25g/m² (parte interior)

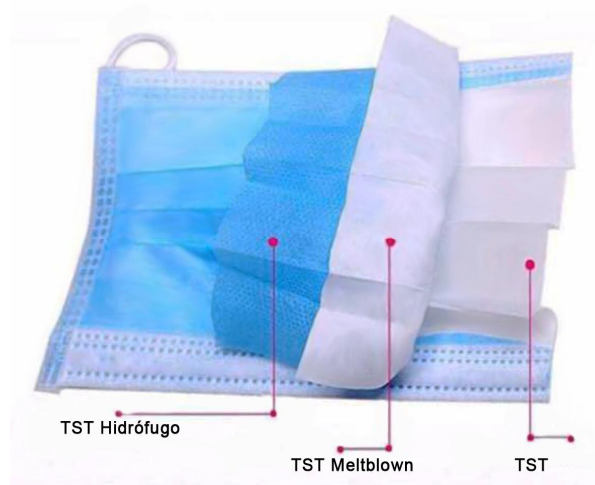

Mascarilla Sanitaria de 3 capas

Propiedades específicas de producto

Mascarilla con gomas confortables y suaves para minimizar el roce.

Alta eficacia a la filtración bacteriana (EFB) % $\geq 95\%$.

Presión diferencial (Pa) (Resistencia a la respiración) < 40 .

Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) ≥ 16 .

Minimiza el riesgo de alergias: libre de látex y carente de fibras de vidrio

Facilidad de respiración: la mascarilla se ha fabricado con un material de alta protección y baja resistencia a la respiración

Alta resistencia a la ruptura ya que tiene los 4 bordes termosellados

Periodo recomendado de uso: 4 horas

Características

Pieza nasal flexible para un mejor ajuste

Material no tejido de 3 capas

Libre de látex

Color azul o blanco dependiendo de la disponibilidad de tejidos

Instrucciones de uso

Lavar manos con agua y jabón

Sujetar la mascarilla desde las gomas de ajuste y colocar sobre nariz y boca con la parte de color azul hacia fuera.

Fijar las gomas de sujeción tras las orejas

Ajustar la banda metálica sobre la nariz. Para retirarla, siempre desde las gomas de sujeción, no toque la parte delantera. Deseche la mascarilla y lávese las manos de nuevo. Cuide el medio ambiente y tire esta mascarilla a un contenedor de reciclaje.

